

# Grab'n Go<sup>™</sup>

Sistema Portátil de Oxigênio Medicinal



**Tempo estimado de duração do cilindro Grab'n Go (h:min) conforme a vazão utilizada e a pressão indicada no manômetro do equipamento**

Pressão indicada no manômetro (psi)	3000	2800	2600	2400	2200	2000	1800	1600	1400	1200	1000	800	600	400	200	100	
Volume estimado de Oxigênio no cilindro (litros)	984,4	917,6	850,9	784,2	717,4	650,7	584,0	517,2	450,5	383,7	317,0	250,3	183,5	116,8	50,1	16,7	
Vazão de Oxigênio utilizada pelo paciente (litros/min)	0,5	32:48	30:35	28:21	26:08	23:54	21:41	19:28	17:14	15:01	12:47	10:34	8:20	6:07	3:53	1:40	0:33
	1	16:24	15:17	14:10	13:04	11:57	10:50	9:44	8:37	7:30	6:23	5:17	4:10	3:03	1:56	0:50	0:16
	1,5	10:56	10:11	9:27	8:42	7:58	7:13	6:29	5:44	5:00	4:15	3:31	2:46	2:02	1:17	0:33	0:11
	2	8:12	7:38	7:05	6:32	5:58	5:25	4:52	4:18	3:45	3:11	2:38	2:05	1:31	0:58	0:25	0:08
	3	5:28	5:06	4:43	4:21	3:59	3:36	3:14	2:52	2:30	2:08	1:45	1:23	1:01	0:39	0:16	0:05
	4	4:06	3:49	3:32	3:16	2:59	2:42	2:26	2:09	1:52	1:36	1:19	1:02	0:45	0:29	0:12	0:04
	6	2:43	2:33	2:21	2:10	1:59	1:48	1:37	1:26	1:15	1:04	0:52	0:41	0:30	0:19	0:08	0:02
	8	2:03	1:54	1:46	1:38	1:29	1:21	1:13	1:04	0:56	0:48	0:39	0:31	0:22	0:14	0:06	0:02
	15	1:05	1:01	0:56	0:52	0:47	0:43	0:38	0:34	0:30	0:25	0:21	0:16	0:12	0:07	0:03	0:01
	25	0:39	0:36	0:34	0:31	0:28	0:26	0:23	0:20	0:18	0:15	0:12	0:10	0:07	0:04	0:02	0:00

Os tempos definidos acima são apenas uma estimativa teórica e não devem ser utilizados para casos que exijam precisão de informação.